

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Специальной подготовки к работе изделия не требуется.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

- Ознакомиться с этикеткой.
- Аккуратно вскрыть наружный пакет по линии отрыва от насечки параллельно сварному шву.
- Выложить комплект в упаковочной пленке на маточный или сестринский стол.
- Развернуть упаковочную пленку.
- Простыня и подстилка используются для покрытия родового стола.
- Для соблюдения стерильности на пациентку надевают рубашку для роженицы, бахилы, шапочку.
- Прокладка гинекологическая применяется с гигиенической целью для пациентки.
- Салфетка, впитывающая многослойная используется для покрытия пеленального столика.
- Салфетка и пленка используются для туалета новорожденного.
- Браслеты и бирки для новорожденных используются для идентификации новорожденного.
- Чехол-конверт для новорожденного, чепчик, рубашку для новорожденного, комбинезон для новорожденного, пинетки, педиатрическое одеяло и покрывало используют как одежду для новорожденного.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Перед утилизацией обязательная дезинфекция камерным, химическим или методом автоклавирования.

Продезинфицированный комплект подлежит обычной утилизации по категории медицинских отходов группы «Б» в соответствии с СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Комплекты в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться по группе 1 по ГОСТ 15150.