

Срок годности и дату изготовления;

Номер партии.

А также: состав, размеры, плотность материалов, количество каждого изделия, номер комплектовщика и ОТК.

Средний срок годности стерильных комплектов не менее 5 лет.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Аллергическая реакция к материалам и их компонентам в составе КОМПЛЕКТОВ.

В случае возникновения аллергической реакции прекратить использовать КОМПЛЕКТ и обратиться за медицинской помощью.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Перед применением необходимо вскрыть первую (потребительскую) упаковку с маркировкой и описанием состава комплекта. Проверить состав комплекта.

ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

- Ознакомиться с этикеткой.
- Аккуратно вскрыть наружный пакет по линии отрыва от насечки параллельно сварному шву.
- Выложить халат в упаковочной пленке на маточный или сестринский стол.
- Развернуть упаковочную пленку.
- Надеть куртку и брюки хирургические.
- Надеть шапочку-колпак, бахилы, маску хирургическую.
- При помощи операционной медсестры надеть стерильный халат.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Перед утилизацией обязательная дезинфекция камерным, химическим или методом автоклавирования.

Продезинфицированный комплект подлежит обычной утилизации по категории медицинских отходов группы «Б» в соответствии с СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Комплекты в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться по группе 1 по ГОСТ 15150.