

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
ЗАО «ЗДРАВМЕДТЕХ -Е»  
Н.В. Поляков



2018г.

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению «Комплектов белья акушерского одноразового стерильного».  
(наименование изделия медицинского назначения)

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

«Комплекты белья акушерского одноразового стерильного» применяются с целью создания барьера между операционным полем и потребителем.

### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«Комплекты белья акушерского одноразового стерильного» предназначены для применения при оперативных вмешательствах и в послеоперационном периоде.

Комплекты изготовлены из нетканого многослойного материала на полипропиленовой основе.

Комплекты поставляются в стерильном виде в индивидуальной упаковке готовые к эксплуатации.

Комплекты должны быть стерильными. Стерилизация осуществляется радиационным способом согласно инструкции по стерилизации, разработанной уполномоченной организацией.

Упаковка составляющих комплектов герметична.

На этикетке, находящейся внутри упаковки, указаны

Наименование комплекта,

Наименование страны-изготовителя;

Наименование фирмы-изготовителя;

Основное назначение комплекта или область его применения;

Правила и условия безопасного хранения, транспортировки;

Основные потребительские свойства или характеристики;

Информация об обязательной сертификации;

Юридический адрес изготовителя и (или) продавца.

Срок годности и дата изготовления;

Номер партии.

А также: состав, размеры, плотность материалов, количество каждого изделия, номер комплектовщика и ОТК.

Средний срок годности стерильных комплектов не менее 5 лет.

### 3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Аллергическая реакция к материалам и их компонентам в составе КОМПЛЕКТОВ.

#### 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Специальной подготовки к работе изделия не требуется.

#### 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

- Ознакомиться с этикеткой.
- Аккуратно вскрыть наружный пакет по линии отрыва от насечки параллельно сварному шву.
- Выложить комплект в упаковочной пленке на маточный или сестринский стол.
- Развернуть упаковочную пленку.
- Простыня и подстилка используются для покрытия родового стола.
- Для соблюдения стерильности на пациентку надевают рубашку для роженицы, бахилы, шапочку.
- Прокладка гинекологическая применяется с гигиенической целью для пациентки.
- Салфетка, впитывающая многослойная используется для покрытия пеленального столика.
- Салфетка и пеленка используются для туалета новорожденного.
- Браслеты и бирки для новорожденных используются для идентификации новорожденного.
- Чехол-конверт для новорожденного, чепчик, рубашку для новорожденного, комбинезон для новорожденного, пинетки, педиатрическое одеяло и покрывало используют как одежду для новорожденного.

#### УТИЛИЗАЦИЯ:

Перед утилизацией обязательная дезинфекция камерным, химическим или методом автоклавирования.

Продезинфицированный комплект подлежит обычной утилизации по категории медицинских отходов группы «Б» в соответствии с СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»

#### 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Комплекты в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться по группе 1 по ГОСТ 15150.