

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО «ЗДРАВМЕДТЕХ -Е»
Н.В. Поляков



2018г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия
Комплекты белья хирургического одноразового стерильного "ЗДРАВМЕДТЕХ"
по ТУ 9398-003-38957094-2005
Регистрационное удостоверение ФСР 2010/08321 от 25.04.2018

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект белья хирургического одноразового стерильного предназначен для применения при операционных вмешательствах.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплект белья хирургического одноразового стерильного предназначен для применения при операционных вмешательствах.

Комплект изготовлен
из нетканого многослойного материала на полипропиленовой основе,
из нетканого материала на основе полиэтилена модифицированного «Tyvek» или не модифицированного, прозрачного и непрозрачного,
из материала нетканого «Softesse».

Комплект поставляется в стерильном виде в индивидуальной упаковке готовый к эксплуатации.

Стерилизация осуществляется радиационным способом согласно инструкции по стерилизации, разработанной уполномоченной организацией.

Упаковка составляющих комплектов герметична.

На этикетке, находящейся внутри упаковки, указаны состав, размеры, плотность и количество каждого изделия, срок годности комплекта, дата выпуска, номер комплектовщика и ОТК.

Гарантийный срок хранения 5 лет.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаний нет.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Специальной подготовки к работе изделия не требуется.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

- Ознакомиться с этикеткой.
- Аккуратно вскрыть наружный пакет по линии отрыва от насечки параллельно сварному шву.
- Выложить комплект в упаковочной пеленке на маточный или сестринский стол.
- Развернуть упаковочную пленку.

- Простыню, предназначенную для покрытия операционного стола, разложить на операционном столе сначала в продольном, затем в поперечном направлении.
- На простыне с операционной пленкой снять покрытие с липкого слоя, зафиксировать простыню на пациенте.
- Расправить простыню с операционной пленкой в сторону дуги, закрепить при помощи фиксаторов; затем расправить простыню в сторону ног; расправить карманы вокруг операционного поля.
- Снять покрытие с операционной пленки и зафиксировать в области операционного поля.
- Дополнительные простыни использовать в ходе операции.

6. УТИЛИЗАЦИЯ:

Дезинфекция комплекта после его использования возможна автоклавированием, камерным или химическими методами. Проздезинфицированный комплект подлежит обычной утилизации по категории медицинских отходов группы «Б» в соответствии с СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Комплекты в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться по группе 2С по ГОСТ 15150.