

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО «ЗДРАВМЕДТЕХ -Е»
Н.В. Поляков



_____ 2018г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению «Комплекта одежды хирургической одноразовой стерильной
«ЗДРАВМЕДТЕХ»
(стерильные шапочка, маска, халат, фартук,
бахилы, костюм (куртка, брюки), комбинезон, нарукавники)
(наименование изделия медицинского назначения)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект одежды хирургической одноразовой стерильной «ЗДРАВМЕДТЕХ» (стерильные шапочка, маска, халат, фартук, бахилы, костюм (куртка, брюки), комбинезон, нарукавники) применяется с целью создания барьера между операционным полем и потребителем.

2. ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Комплект одежды хирургической одноразовой стерильной «ЗДРАВМЕДТЕХ» предназначен для применения в операционных, родовых, перевязочных, процедурных кабинетах лечебных учреждений для защиты персонала от возможного профессионального заражения.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплект одежды хирургической одноразовой стерильной «ЗДРАВМЕДТЕХ» изготовлен из нетканого многослойного материала на полипропиленовой основе. Комплекты поставляется в стерильном виде в индивидуальной упаковке готовые к эксплуатации.

Комплекты должны быть стерильными. Стерилизация осуществляется радиационным способом согласно инструкции по стерилизации, разработанной уполномоченной организацией.

Упаковка составляющих комплектов герметична.

На этикетке, находящейся внутри упаковки, указаны

Наименование комплекта,

Наименование страны-изготовителя;

Наименование фирмы-изготовителя;

Основное назначение комплекта или область его применения;

Правила и условия безопасного хранения, транспортировки;

Основные потребительские свойства или характеристики;

Юридический адрес изготовителя и (или) продавца.

Срок годности и дату изготовления;

Номер партии.

А также: состав, размеры, плотность материалов, количество каждого изделия, номер комплектовщика и ОТК.

Средний срок годности стерильных комплектов не менее 5 лет.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Аллергическая реакция к материалам и их компонентам в составе КОМПЛЕКТОВ.

В случае возникновения аллергической реакции прекратить использовать КОМПЛЕКТ и обратиться за медицинской помощью.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Перед применением необходимо вскрыть первую (потребительскую) упаковку с маркировкой и описанием состава комплекта. Проверить состав комплекта.

ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

- Ознакомиться с этикеткой.
- Аккуратно вскрыть наружный пакет по линии отрыва от насечки параллельно сварному шву.
- Выложить халат в упаковочной пленке на маточный или сестринский стол.
- Развернуть упаковочную пленку.
- Надеть куртку и брюки хирургические.
- Надеть шапочку-колпак, бахилы, маску хирургическую.
- При помощи операционной медсестры надеть стерильный халат.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Перед утилизацией обязательная дезинфекция камерным, химическим или методом автоклавирования.

Продезинфицированный комплект подлежит обычной утилизации по категории медицинских отходов группы «Б» в соответствии с СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Комплекты в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться по группе 1 по ГОСТ 15150.