

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
АО «ЗМТ»  
Н.В. Поляков

«27» июня 2022 г.

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению «Комплектов белья для гинекологических операций  
одноразовые стерильные «Здравмедтех» по ТУ 9398-004-38957094-02»  
(наименование изделия медицинского назначения)

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

«Комплекты белья для гинекологических операций одноразовые стерильные» применяется с целью создания барьера между операционным полем и потребителем.

### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«Комплекты белья для гинекологических операций одноразовые стерильные» предназначены для применения при оперативных вмешательствах и в послеоперационный период.

Комплекты изготовлены из нетканого многослойного материала на полипропиленовой основе

Комплекты поставляется в стерильном виде в индивидуальной упаковке готовые к эксплуатации.

Комплекты должны быть стерильными. Стерилизация осуществляется радиационным способом согласно инструкции по стерилизации, разработанной уполномоченной организацией.

Упаковка составляющих комплектов герметична.

На этикетке, находящейся внутри упаковки, указаны

Наименование комплекта,

Наименование страны-изготовителя;

Наименование фирмы-изготовителя;

Основное назначение комплекта или область его применения;

Правила и условия безопасного хранения, транспортировки;

Основные потребительские свойства или характеристики;

Информация об обязательной сертификации;

Юридический адрес изготовителя и (или) продавца.

Срок годности и дату изготовления;

Номер партии.

А также: состав, размеры, плотность материалов, количество каждого изделия, номер комплектовщика и ОТК.

Средний срок годности стерильных комплектов не менее 5 лет.

### 3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Аллергическая реакция к материалам и их компонентам в составе КОМПЛЕКТОВ.

### 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Специальной подготовки к работе изделия не требуется.

### 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

- Ознакомиться с этикеткой.
- Аккуратно вскрыть наружный пакет по линии отрыва от насечки параллельно сварному шву.
- Выложить комплект в упаковочной пленке на маточный или сестринский стол.
- Развернуть упаковочную пленку.
- Простыню, предназначенную для покрытия операционного стола, разложить на операционном столе сначала в продольном, затем в поперечном направлении.
- На простыне с операционной пленкой снять покрытие с липкого слоя, зафиксировать простыню на пациентке.
- Расправить простыню с операционной пленкой в сторону дуги, закрепить при помощи фиксаторов; затем расправить простыню в сторону ног; расправить карманы вокруг операционного поля.
- Дополнительные простыни использовать в ходе операции.
- Для соблюдения стерильности на пациентку надевают рубашку для роженицы, бахилы, шапочку.
- Прокладка гинекологическая применяется с гигиенической целью для пациентки.
- Простыня и подстилка используются для покрытия гинекологического кресла или кушетки.

#### УТИЛИЗАЦИЯ:

Перед утилизацией обязательная дезинфекция камерным, химическим или методом автоклавирования.

Продезинфицированный комплект подлежит обычной утилизации по категории медицинских отходов группы «Б» в соответствии с СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»

### 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Комплекты в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться по группе 1 по ГОСТ 15150